

## Monteringsanvisning för Färd- och parkeringsbroms

### Nurmi Neo

2014

Quality for life



1. Börja med att montera bromshandtaget bakom handtaget på bågen. Detta görs enkelt genom att lossa de två skruvarna på bromshandtaget och montera de båda delarna tillsammans runt bågen och därefter låsa skruvarna igen.





2. I de fall bromshandtaget skall monteras på en extra hög båge med underarmsstöd, måste bromshandtaget monteras på det vinkelräta handtagsröret med extra bussningar.





3. Tryck sedan bromshandtaget till maxläge (se bild) för att sätta fast wire. Öppna skruven i mässingsinsatsen och dra wiren genom bromse tills nippeln hamnar i mässingsinsatsen. Dra sedan åt skruven igen.



4. Trä wire-skyddet över wiren och fäst wiren mot ramen nedanför exenterspaken för att förhindra slitage samt minimera risk att fastna.

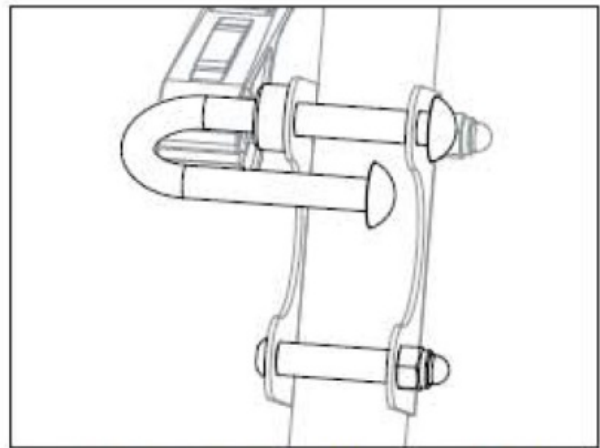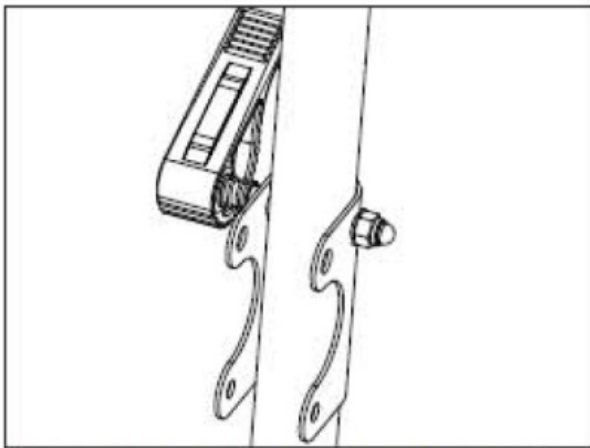

5. Börja med att ta bort backspärren. Montera bromsbeslaget på den bakre ramen genom att skruva tillbaka backspärren i samma skruvhål igen. Bromsbeslagets öppna del skall vara vänd mot färdriktningen.

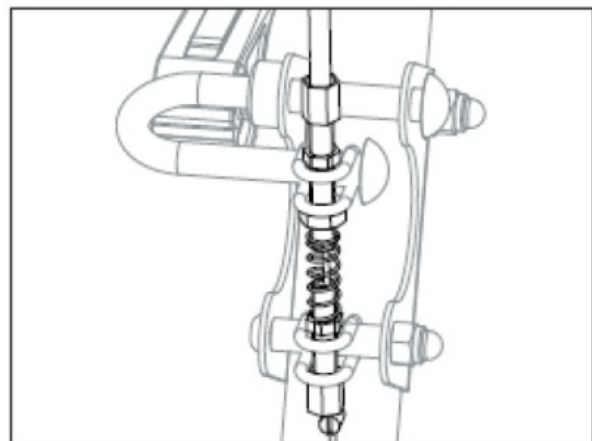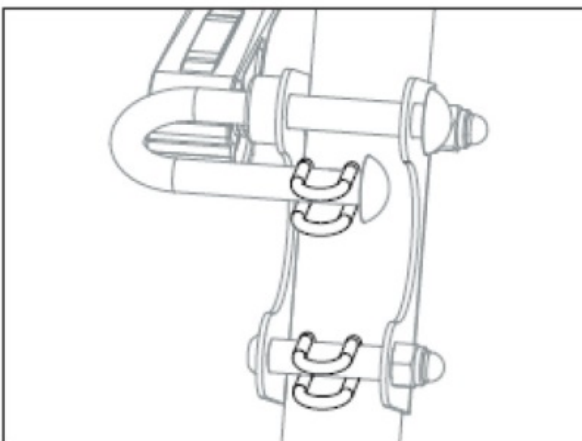

6. Skruva fast även den nedre skruven. Montera ställringen på den långa sidan av bromsspinnen och trä den igenom det övre hålet på bromsbeslaget. Tryck fast ändhattar på båda ändarna av bromsspinnen. Dra åt skruven tillräckligt så att bromsspinnen kan röras upp och ner men minimalt åt sidan.

Trä på en ögla på varje bromspinne och montera därefter wiren med dess stoppskruvar enligt bild vänster ovan. Sträck wiren så att bromspinnen ligger ca 2mm ovanför hjulet.


**Justering av bromsar:** Bromsarna måste kontrolleras och justeras med jämna mellanrum. Detta görs genom att skruva åt eller lossa den övre skruven. Genom att lossa de övre skruvarna ökas bromsstyrkan.

Vid bortmontering följ anvisningarna ovan i omvänd ordning.


## Monteringsanvisning sittplatta Nurmi Neo

2014


Quality for life

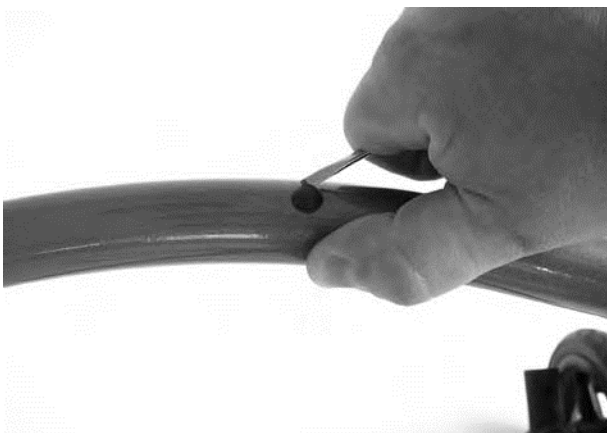

1. Ta bort plastpluggarna på ramen.

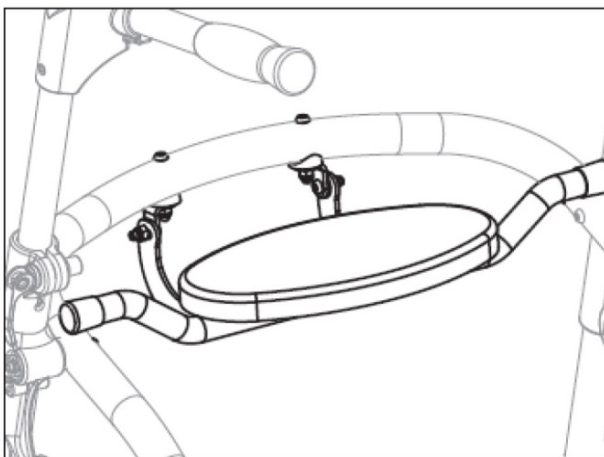

2. Montera sittplattan med tillhörande skruvar i ramen där plastpluggarna tagits bort.

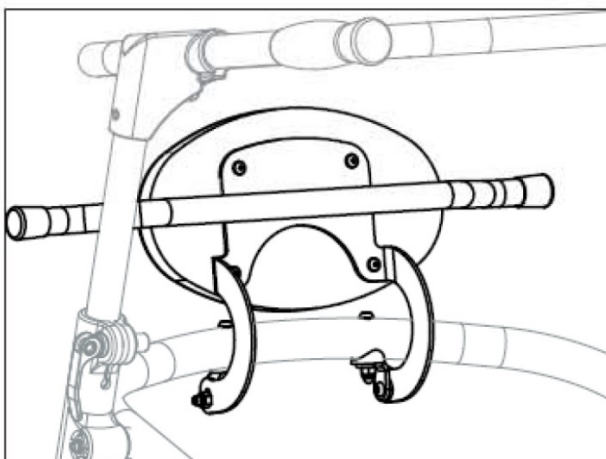

3. För att byta ut polstringen på sittplattan lossas skruvarna på plattans undersida.

För avmontering av sittplatta, följ anvisningarna ovan i omvänd ordning.

## Monteringsanvisning släpbroms Nurmi Neo

2014

Quality for life



1. Börja med att montera bort bakhjul samt tippskyddshållare. Placera bulten i tippskyddshållaren enligt bilden.



2. Montera sedan tillbaka tippskyddshållaren på bakramen av rollatorn och ersätt distansbrickan med släpbromsen (se bild 3).



Bild 3



4. Montera därefter tillbaka hjulet och dra åt med momentnyckel 20 Nm.

För justering av släpbromsen, se bruksanvisning.