

## Bruksanvisning 1-handsdrivning Avantgarde


**Allmänt:** 1-handsdrivning är lämplig för brukare med ensidesförlamning eller brukare som inte kan använda båda armarna för att köra rullstolen. Det fodras ofta mer träning för att kunna manövrera sin rullstol om den har 1-handsdrivning och det lämpar sig sämre att köra i sluttande underlag, (2 armar är starkare än 1)

Nedanstående instruktion är endast en kortfattad beskrivning av hur man hanterar rullstolen. Träning ska ge tillsammans med sjukgymnastik, arbetsterapeut eller annan personal.

**Montering/hopfällning:** Hjulen monteras genom att dragspärren öppnas (1), skjut in axeln och låsa åter dragspärren. Kontrollera noga att hjulet sitter fast. Tväraxeln (2) monteras genom att den trycks ihop, hakas fast på ena sidans drivaxel, därefter på andra sidan. Kontrollera att den hamnat i läge. Demontering sker på omvänt vis.

**Körning:** Den yttre (mindre) drivningen (3) driver hjulet på motstående sida och den inre (större) drivningen (4) driver hjulet den är monterad på.

**Tips!** Hjulen kan växlas mellan sidorna beroende av brukarens behov. Vid behov av bättre grepp finns lösa drivningsöverdrag att beställa. Ekerskydd kan monteras på passiv sida.

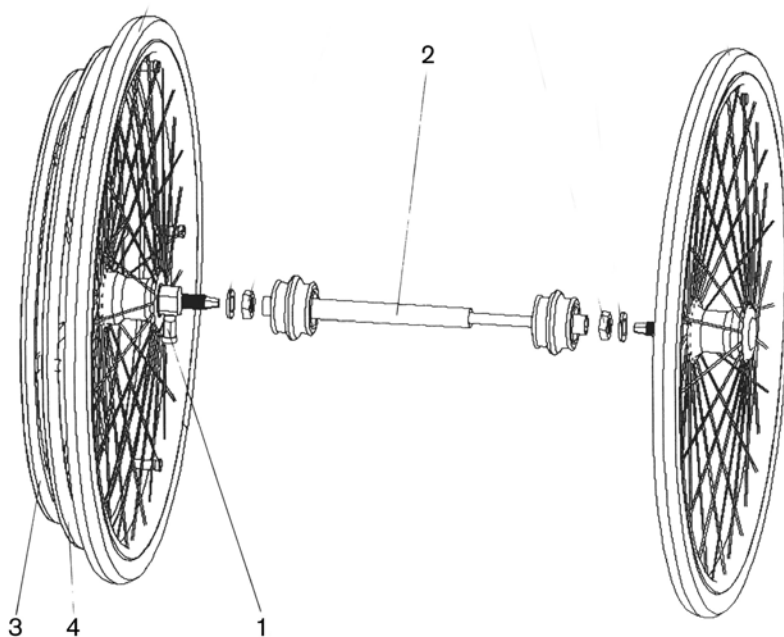

Otto Bock Scandinavia AB

Postadress:

Otto Bock Scandinavia AB  
Box 623 · 601 14 Norrköping

Besöks-/leveransadress:

Koppargatan 3  
602 23 Norrköping

Styrelsens säte:

Norrköping  
SVERIGE

Telefon:

011-28 06 00 , vxl  
Fax:  
011-31 20 05

Organisationsnr:

5561077842  
info@ottobock.se