

## Bruksanvisning 1-handsdrivning Start

**Allmänt:** 1-handsdrivning är lämplig för brukare med ensidesförlamning eller brukare som inte kan använda båda armarna för att köra rullstolen. Det fördras ofta mer träning för att kunna manövrera sin rullstol om den har 1-handsdrivning och det lämpar sig sämre att köra i sluttande underlag, (2 armar är starkare än 1).


Nedanstående instruktion är endast en kortfattad beskrivning av hur man hanterar rullstolen. Träning ska ge tillsammans med sjukgymnastik, arbetsterapeut eller annan personal.

**Montering/hopfällning:** Hjulen monteras genom att trycka på navcentrum och sedan föra in hjulaxeln i mutterstycket. Tvärxeln (2) monteras genom att skruvvredet (1) lossas så att axeln hamnar mellan hjulaxlarna. Tryck fast axeln på ena sidan, dra isär axeln tills dessa att den fäster på andra sidan och lås sedan skruvvredet igen.

Demontering sker genom att skruvvredet lossas och sedan på omvänt sätt. Kontrollera att tvärxeln hamnat i läge och att den fäster korrekt i hjulaxeln.

**Körning:** Den ytter(mindre) drivringen (3) driver hjulet på motstående sida och den inre(större) drivringen (4) driver hjulet den är monterad på.

**Tips!** Hjulen kan växlas mellan sidorna beroende av brukarens behov. Vid behov av bättre grepp finns lösa drivningsöverdrag att beställa. Ekerskydd kan monteras på passiv sida.

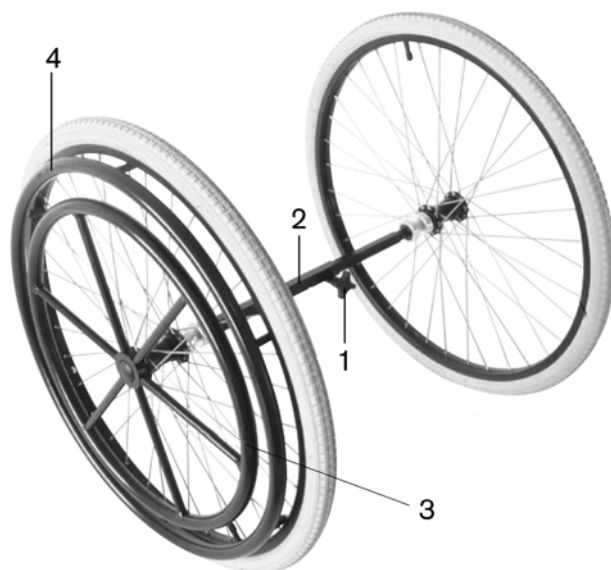

Otto Bock Scandinavia AB

Postadress:  
Otto Bock Scandinavia AB  
Box 623 · 601 14 Norrköping

Besöks-/leveransadress:  
Koppargatan 3  
602 23 Norrköping

Styrelsens säte:  
Norrköping  
SVERIGE

Telefon:  
011-28 06 00 , vxl  
Fax:  
011-31 20 05

Organisationsnr:  
5561077842  
[info@ottobock.se](mailto:info@ottobock.se)