

Kortinformation ProContour


Funktionell och bekväm sittdyna som enkelt designas av förskrivaren utifrån brukarens specifika behov. Produceras i högkvalitativt skum (brandklassat och godkänt enl. DIN 75200).

ottobock.

Bruksanvisning ProContour

Användning av sittdynan

1. Kontrollera först att dynan sitter säkert fast i underlaget/-redet och har rätt vinkel/lutning.
2. Placera brukaren korrekt i dynan så han/hon sitter med fullt stöd. Kontrollera att bäckenet har en så rak position som möjligt. Efterjustera vid behov!
3. Spänn fast höftbältet. Eventuell bältesplös ska placeras på den sida åt vilken brukaren brukar vrida sig.
4. Spänn eventuella övriga band och selar.
5. Ställ in eller kontrollera att alla eventuella stöd sitter korrekt (nackstöd, fotstöd, bålstöd, knästopper mm.)

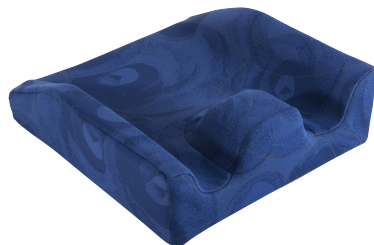

Observera!



Dynan är specialanpassad för den enskilde brukaren men var observant på om det uppstår problem som trycksår, rodnader etc. Kontakta i så fall ansvarig ordinator! Ofta orkar brukaren inte sitta "aktivt" mer än kortare stunder. Variera därför sittandet till ett mer vilsamt läge flera gånger under dagen.

TYGÖVERDRAG

Dynan har löstagbart tygöverdrag för att underlätta tvätt. Det är uppmärkt med tvättanvisningar som även markerar placeringen av tygöverdraget.

Tvättanvisningarna ska placeras bakåt på sittdelen (se skiss).



KONTROLL AV SLITAGE

Kontrollera alltid fästpunkter, fixeringsband och positioneringsband på slitage före användning. Kontakta er ordinator för eventuell åtgärd.

SKÖTSELRÅD



Rekommenderat att varje natt lyfta ut sittdynan ur rullstolen samt öppna överdraget för att tillåta luftning av skumdynan.

Bruksanvisning för specialsitsar

ABS • Shape • ProContour



**Läs igenom denna bruksanvisning noga innan sitsen tas i bruk!
Informera även alla andra som kommer hantera sitsen.**

**Om ni har några frågor kan ni kontakta ansvarig ordinator eller
Otto Bock Scandinavia AB.**

©OttoBock OBESH2=13.09.SE.CS



Otto Bock Scandinavia AB

Box 623 • 601 14 Norrköping • Sverige • Tel. +46 11 280600 • Fax +46 11 312005 • www.ottobock.se

Kortinformation ABS-sits

Individuellt formad sits för brukaren med höga krav på stöd och stabilitet. Formen, med eller utan posturala korrigeringar, skapas i vakuumpudde och produceras med foder i Plastazote (brandklassat och godkänt enl. FMVSS 302, ISO 3582), omslutet av ABS-plast.

Bruksanvisning ABS-sits

Användning av sitsen

1. Kontrollera först att sitsen sitter säkert fast i underlaget/-redet och har rätt vinkel/lutning.
2. Placera brukaren korrekt i sitsen så han/hon sitter med fullt stöd. Kontrollera att bäckenet har en så rak position som möjligt. Efterjustera vid behov!
3. Spänn fast höftbältet. Eventuell bältesplös ska placeras på den sida åt vilken brukaren brukar vrida sig.
4. Spänn eventuella övriga band och selar.
5. Ställ in eller kontrollera att alla eventuella stöd sitter korrekt (nackstöd, fotstöd, bålstöd, knästopper mm.)



Varning!

Om sitsen är utrustad med handtag så får dessa endast användas om sitsen är tom. **Lyft aldrig i handtagen med brukaren i sitsen!**



Observera!

Sitsen är specialanpassad för den enskilde brukaren men var observant på om det uppstår problem som trycksår, rodnader etc. Kontakta i så fall ansvarig ordinator! Ofta orkar brukaren inte sitta "aktivt" mer än kortare stunder. Variera därför sittandet till ett mer vilsamt läge flera gånger under dagen.

FODER

Om sitsen är utrustad med löstagbara foder så är de uppmärkta 1, 2 och ev. 3. Fodren är tillbehör och tillverkade för att placeras i följande speciella ordning:

Foder 1: Detta ska alltid placeras närmast kroppen.

Foder 2: Detta ska placeras under foder 1.

Foder 3: Detta placeras under foder 2.

Observera! Om brukaren har behov av extra utrymme t.ex. på grund av en tjock jacka så rekommenderas att foder 2 eller 3 tas bort i första hand.

KONTROLL AV SLITAGE

Kontrollera alltid fästpunkter, fixeringsband och positioneringsband på slitage före användning. Kontakta er ordinator för eventuell åtgärd.

SKÖTSELRÅD



Rekommenderat att varje natt lyfta ut fodren ur ABS skalet för att tillåta luftning och torka rent och torrt i sitsen vid behov.

Kortinformation Shape2.

Individuellt formad sits för brukaren med höga krav på tryckavlastning och komfort. Formen, med eller utan posturala korrigeringar, skapas i vakuumpudde och produceras i högkvalitativt skum (brandklassat och godkänt enl. DIN 75200), omslutet av ABS-plast.

Bruksanvisning Shape 2

Användning av sitsen

1. Kontrollera först att sitsen sitter säkert fast i underlaget/-redet och har rätt vinkel/lutning.
2. Placera brukaren korrekt i sitsen så han/hon sitter med fullt stöd. Kontrollera att bäckenet har en så rak position som möjligt. Efterjustera vid behov!
3. Spänn fast höftbältet. Eventuell bältesplös ska placeras på den sida åt vilken brukaren brukar vrida sig.
4. Spänn eventuella övriga band och selar.
5. Ställ in eller kontrollera att alla eventuella stöd sitter korrekt (nackstöd, fotstöd, bålstöd, knästopper mm.)



Varning!

Om sitsen är utrustad med handtag så får dessa endast användas om sitsen är tom. **Lyft aldrig i handtagen med brukaren i sitsen!**




Observera!

Sitsen är specialanpassad för den enskilde brukaren men var observant på om det uppstår problem som trycksår, rodnader etc. Kontakta i så fall ansvarig ordinator! Ofta orkar brukaren inte sitta "aktivt" mer än kortare stunder. Variera därför sittandet till ett mer vilsamt läge flera gånger under dagen.

TYGÖVERDRAG

Sitsen har löstagbart tygöverdrag för att underlätta tvätt. Det är uppmärkt med tvättanvisningar som även markerar placeringen av tygöverdraget.

Tvättanvisningarna ska placeras uppåt på ryggdelen och bakåt på sittdelen (se skiss).

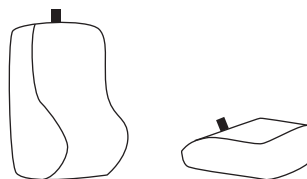

KONTROLL AV SLITAGE

Kontrollera alltid fästpunkter, fixeringsband och positioneringsband på slitage före användning. Kontakta er ordinator för eventuell åtgärd.

SKÖTSELRÅD



Rekommenderat att varje natt lyfta ut sitt- och ryggdynan ur ABS skalet samt öppna överdragen för att tillåta luftning av skumdynorna. Torka rent och torrt i sitsen vid behov.